

Instrukcja nanoszenia próbki krwi żyłnej na bibułę

UWAGA! Dla jednego pacjenta należy przygotować 2 karty zawierające 3 plamy krwi na bibule.

1. Pobrać próbkę krwi żyłnej do sterylnej strzykawki lub bezpośrednio do probówki z dodatkiem EDTA – tak jak na morfologię krwi. Natychmiast po pobraniu próbkę należy ostrożnie, ale dokładnie wymieszać. Alternatywą, choć niepolecaną metodą jest pobranie krwi z palca.
2. W najkrótszym możliwym czasie po pobraniu, krew należy nakropić na bibułę.
UWAGA ! plamy krwi stanowią materiał do badań genetycznych, dlatego:
 - Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia bibuły, podczas obchodzenia się z nimi należy nosić rękawiczki i unikać dotykania pola pobierania próbki.
 - Karty do pobierania próbek przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku. Zabrania się ponownego ich używania oraz stosowania tej samej karty do pobierania próbek u więcej niż jednego pacjenta lub dla więcej niż jednej próbki.
3. Wyjąć kartę z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem. Kartę dokładnie podpisać (drukowanymi literami) imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem PESEL, w przypadku jego braku datą urodzenia.
4. Delikatnie wymieszać pobrany materiał. Za pomocą pipety z wymienną końcówką nanieść **50 µl krwi na bibułę, na środek okręgu**. Wypełnić 3 pola, nie wcierać ani nie rozmazywać próbki na bibule.

Ryc.1. Prawidłowo naniesione próbki krwi na bibułę.



5. Suszyć plamki krwi przez co najmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej otoczenia, na poziomej, odsłoniętej, niechłonnej powierzchni, z daleka od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie podgrzewać w celu przyspieszenia schnięcia.

Aby zapobiec zanieczyszczeniom krzyżowym próbek, nie należy układać kart na sobie podczas suszenia

6. Dwie karty indywidualnego pacjenta należy zapakować do osobnej koperty lub torebki foliowej/aluminiowej, dołączyć wypełnione skierowanie i przesłać do Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej.

Informacje dodatkowe:

W celu otrzymania Karty „Whatman 903®” należy kontaktować się z sekretariatem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej - Pani Izabela Misiak, tel. (22) 43-12-158 ,

Dane kontaktowe:

Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Płocka 26

01-138 Warszawa