

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU KRWI DO TESTU T-SPOT.TB (IGRA) W KIERUNKU ZAKAŻENIA PRĄTKIEM GRUŻLICY

Test T-SPOT.TB podobnie jak Quantiferon TB-Gold należy do **testów IGRA** - testów immunologicznych. Zasada ich działania opiera się na pomiarze interferonu gamma (INF γ) wydzielonego przez swoiste limfocyty T stymulowane przez antygeny specyficzne dla *Mycobacterium tuberculosis* i nielicznych innych gatunków prątków (*M.kansasi*, *M.szulgai*, *M. marinum*).

- Dorośli i dzieci powyżej 9 roku życia: **6ml krwi do probówki heparynizowanej (heparyna litowa)**
- Dzieci 2-9 letnie: **4 ml krwi**
- Dzieci poniżej 2 roku życia: **2ml krwi**

Krew należy dostarczyć do laboratorium w **ciągu 8 godzin od pobrania !!!** Próbkę krwi muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej (10-25°C).